

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия.

Синомарил, назальный аспиратор для грудных детей с 3 одноразовыми насадками.

Состав и описание медицинского изделия

Назальный вакуумный аспиратор состоит из устойчивого центрального корпуса для обеспечения фиксации, изготовленного из полиэтилена высокой плотности, гибкой силиконовой трубки, способствующей движению и аспирационному мундштуку из полипропилена для отсасывания носового секрета. 3 одноразовые насадки из термопластичного эластомера с наконечником анатомической формы, соответствующему детскому носовому отверстию и поглощающим фильтром, который накапливает носовой секрет, предотвращая его попадания внутрь аспиратора. Наконечник изготовлен из мягкого материала, для предотвращения излишнего дискомфорта в носике малыша.

Не содержит лекарственных средства, биологического или наноматериала.

Блистер, содержащий аспиратор и три одноразовые насадки анатомической формы. 1 блистер вместе с инструкцией по медицинскому применению помещен в пачку картонную.



Производится в соответствии со спецификацией № LK-FT-071.

Область применения и назначение медицинского изделия для потребителей

оториноларингология

Заложенность носа причиняет много неудобств младенцам, препятствуя нормальному дыханию, затрудняет процесс лактации и сна.


Синомарил предназначен для удаления носового секрета, когда у малыша заложен нос из-за гриппа, простуды, синусита, аллергических реакций и всех патологий, которые сопровождаются насморком, таким образом, облегчая дыхание ребенка и самочувствие.

Способ применения

1. Положите малыша на спину на безопасной и удобной поверхности.
2. Поместите съемную насадку в центральный корпус вакуумного аспиратора (см. рисунок).
3. Поместите наконечник насадки в носовое отверстие. Аккуратно, медленно и равномерно тяните воздух ртом через мундштук. Фильтр удерживает секрет и предотвращает его вход в трубку и насадку, таким образом, исключая любую возможность попадания внутрь.
4. Повторите эту процедуру с другими носовым отверстием.
5. Вытащите из носа насадку с отсосанной слизью и выбросьте.

Для разжижения слизи промывание носа может осуществляться с помощью солевого раствора.

Составляющие назального аспиратора

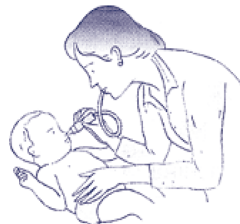

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия

Синомарил очень прост в использовании и не влечет за собой дополнительного риска для младенца.

Противопоказания

Противопоказаний не выявлено.

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

Срок хранения

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Нет особых мер предосторожности при хранении. Храните аспиратор в упаковке во избежание повреждения и попадания солнечного света, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте!

Сведения о производителе медицинского изделия и его уполномоченном представителе

Производитель: PHARMALINK S.L.

Parc Technologic del Valles- Avda. Universitat Autònoma, 13. 08290 Cerdanyola del Valles, Барселона, Испания. Тел. +34666570401.

<http://www.pharmalink-phpk.com>

Изготовлено на заказ для компании Seltfar LTD., Великобритания.

(Berkeley Square house office 132, London, England, W1J 6BD). Тел./факс +44 (0)207 969 1421/1424, info@seltfar.co.uk

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан и организация, принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

Представительство «Сэлтфар ЛТД», г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Нурлы Тау 1А, офис 301. Тел./факс +7 (727) 311 16 28. Электронная почта: info@seltfar.co.kz

Выпуск инструкции по медицинскому применению: XX.XX.XXXX

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке



Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского Союза.



Защита окружающей среды

EXP. Годен до

LOT серия

MD Медицинские изделия

Решение: N047748

Дата решения: 31.01.2022

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо):

Байсеркин Б. С.

(Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе