

## Медициналық бұйымның атасы

Аллергиз®, табиги үнтақты мұрынға арналған спрей, 800 мг, 1 құтты

**Медициналық бұйымның құрамы мен сипаттамасы:** Үнтақты мұрын спрейі, тек табиги компоненттерден тұрады.

**Құрамы:** Целлюлозада есімдік текті үнтақ және бұрыш жалбызы үнтақ

**Сипаттамасы:** ак немесе ак түске жақын ұсақ дисперсті жеңіл бұрыш жалбызыңың хош ісі бар үнтақ. Патенттеген дозаторы мен бұранданы қалпақшасы бар полиптиленнен жасалған құбыда 800 мг-дан. 1 құтты қолдану жөніндегі нұсқаулығымен картон корапшага салынған. Құрамында клиникалық түмділігін дөлелденген консерваннтар, сондай-ақ жүйелі жөнде жергілікті есептегін, жылдан әсереттің дөрөр жоқ. Дағдылану мен мен үйкышылдықты туындағыны. Мұрын спрей аллергендердің созылту есебінен деммен жұтатын ауаңын сапасын жаксартады, сондайтын екпеге тек тазартылған аяу түседі. Аллергиз® мұрын шырышына түсे отырып жұка гель тәрізді үлбрі түзеді, ол мұрын күсына теселеді және шаңнан, микробтар мен басқа да аллергендерден табиги бегет ретінде болады. Аллергиз® организмге қорғаныс механизмін өндіруге көмектеседі, осының арқасында ауда болатын аллергендегер бүттапады, сөйтіл алгерия себебіріне ықпал етеді және аллергиялық реакциялардың дамыну болғызыбайды.

Бір құтының ішінде 200 доза бар және 30 күн қолдануға есептеген.

Өндірушінің техникалық спецификациясына сайкес өндіріледі EU MDR 2017/745.

Медициналық бұйымды тағайындалу бойынша қолданатын жеке тұлғалар үшін медициналық бұйымның қолданылу саласы және тағайындалуы.

Оториноларингология. Аллергиз® маусымдық жыл болындағы риниттің емдеу және профилактикасы үшін қолданылады және аллергендерден сенімді бегет ретінде қолданылады:

- есімдіктер тозаңы

- тұрмыстық аллергендер (үй шаны кенепері, тұрмыстық шан)

- зәндік аллергендер

- жаңуарлар мен құстар және эпидермальді аллергендері

- тарақандар мен басқа да насеңодар аллергендері

- химиялық аллергендер мән деммен жұту кезінде мұрын күсына түсетін басқада микробелшектер.

Ересектердің бақылауымен тек 1,5 жастаң бастап балаларға, ересектерде және жүктілік пен бала емізу кезеңіндегі әйелдерде қолданылады. Аллергиздің аллергенимен болжамды жанаудың, мысалы әсімдіктер гүлдеген кезеңде көшеге шығу, адамдар көп жиналған жерлерде болу, үнді жинау, үй жаңуарларымен жанасу алдында ертерек пайдалану үсنسізділік.

Әдette аллергия симптомдарының басу үшін әрбір таңауға күніне 3 рет бұрку жеткілікті. Әсері бірнеше минуттан кейін болады. Аллергиздің әрбір пайдалануын алдында құтының сілкү үсненілділік.

**Медициналық бұйымды пайдалану кезінде сақтау (қауіпсіздік) шаралары және шектеулер бойынша ақпарат**

Тек интраназалдың қолдануға арналған. Басқа назальдың спреілермен бір мезгілде пайдаланбау керек, әйткені бул Аллергиздің түмділігін темендетуі мүмкін. Үнтақ көзге түсек кезде оны сүмен жуу үсненілділік. Аллергиялық реакция пайда болғанда дәрігермен кеңесініз.

Құты мен оның шытырларын күргәз сақтаңыздар. Құтының сүмен немесе басқа да сыйықтықтармен жұмасыздар, әйткені оған су түсі мүмкін.

**Қолдануға болмайтын жағдайлар.** Целлюлозада және жалбызға жогары сезімталдықта қолдануға болмайды.

**Медициналық бұйымды сақтау мерзімі мен шарттары туралы ақпарат**

Сақтау мерзімі. 3 жыл. Жарамылыштың мерзімі еткеннен кейін пайдалануға болмайды.

**Сақтау шарттары.** Құрғак жерде, 25°C-ден аспайтын температурада сақтау керек. Құтының қалпақшасын тығыз жабылуы тиіс.

Құты зақыншыдандағанда қолдануға болмайды. Балалардың қолы жеткептің жерде сақтау керек!

**Медициналық бұйымның дұрыс орнатылғандығын және оның мақсатына сай қауіпсіздік жұмысы ғалстеге дайын екендігін тексеру үшін қажетті ақпарат**

1. Бірінші пайдалану кезінде үтімділік дозаны рационалды алу үшін дозалашындықтың дұрыс тұралап түзету керек. Ол үшін дозатор-құтының езінізден әрірек орналастырып, ауга 2 сынамалық бұрку жасаңыз – сіз ак үнтақтың ағынның көрсіз және жалбызыңың женіл хош ісіт сезіненіз.

2. Мұрынды мүжіктің тазартылышы.

3. Дем шыгарыныз.

4. Саусаклен бір танауды қысыңыз.

5. Басқа танаудыңға құтының үшін салыңыз.

6. Үнтақтың бір «ағыны» белгінің шығуы үшін құтының қабырғасын баюа, бірақ оны бір мезгілде айналап деммен жұта отырып қатты басыңыз.

7. Препаратьның мұрын жолдарына етү үшін тынысыңыздың екі секунд тоқтата тұрыңыз.

8. Басқа танаумен де ісшаралықтандырыңыз.

Препараттың қажеттілігіне қарай пайдаланыңыз. Аллергиз® препаратын пайдалану кезінде барынша жогары түмділікте алу үшін мұрынның ішкі беттейнде үнтақтың тұркыты қабаты болуын үстап тұру қажет. Бұл аллергендеген мұрын шырышының сезимтал жаражакшасы арасында бөгөт түзеді – осылайша организмінің табиги қорғаныс жүйесі аллергия симптомдарының пайда болуын туындағатын гистаминде белгілі шығармайды. Аллергиздің ингалиляциялық аллергендегер бар ортамен өзара әрекеттесуге дейін қолданыңыздар. Мұрындың әрбір тазартудан кейін дәрінің қайта қолдануға үмітпанаңыз пайдаланыңыздар.

**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ**

Құтының үшін мұрын күсының ылғал беткейіне жанасқанда дозаторда гельді тұғынның түзілүі мүмкін. Бұл жағдайда дозатор-спрейдің үшінде тесікті тазарту керек.

**Медициналық бұйымның өндірушісінің оның үзілітті екілі туралы мәліметтер.**

**Өндіруші:** «Назализ Лтд.». Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, IM4 4QE, Isle of Man, Ұлыбритания. Телефон/ факс: +44 1624 813 171 / +44 1624 813 111 Электронды пошта: info@naseleze.com. Ұлыбритания, Seltfar LTD. компаниясы үшін тапсырыспен дайындалды. (Berkeley Square house office 132, London, England, W1J 6BD Тел./факс: +44 (0)207 969 1421/1424, info@seltfar.co.uk).

**Өндірушінің Қазақстан Республикасы аумағындағы үзілітті екілі «Сэлтфар ЛТД» екілдігі. Алматы қ., Әл-Фараби д-лы 5, Нұрлы тау 1А, 301 кеңсе. Тел/факс +7 (727) 311 16 28. Электронды пошта: info@seltfar.co.kz**

**Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйым жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және медицина-лық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты үйнім:**

«Сэлтфар ЛТД» екілдігі. Алматы қ., Әл-Фараби д-лы 5, Нұрлы тау 1А, 301 кеңсе. Тел/факс +7 (727) 311 16 28. Электронды пошта: info@seltfar.co.kz

**Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтың шығарылуы немесе соңғы рет қайта қаралуы жөніндегі деректер:** XX.XX.XXXX ж.

Шешімі: N044792

Шешім тіркелген күні: 15.11.2021

Мемлекеттік орган басысының (немесе үзілітті тұлғаның) тегі, аты, екесінің аты (бар болса): Байсеркін Б. С.

(Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті)

Осы күжат «Электрондың құжат және электрондық цифрлы қол қою жөніндегі» 2003 жылғы 7 қантардағы КРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең.