



Синомарин®

Клинически подтвержденный
запатентованный продукт



НАЗАЛЬНЫЕ КАПЛИ

100% НАТУРАЛЬНЫЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДЕКОНГЕСТАНТ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ



Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия:

Синомарин® Нео, для грудных детей, капли назальные, 6 или 18 одноразовых стерильных флаконов-капельницы по 5 мл.

Состав и описание медицинского изделия

Состав: Гипертонический раствор натуральной стерилизованной морской воды. Содержание NaCl 23 г/л. (2,3% раствор морской воды). Не содержит жгучих, сосудосуживающих компонентов и консервантов.

Описание: Прозрачная бесцветная жидкость без запаха со слегка солоноватым вкусом.

Синомарин® является 100% натуральным, клинически проверенным противотечевым средством.

За счет того, что **Синомарин®** содержит гипертонический раствор морской воды (2,3% NaCl), он эффективно снимает заложенность носа и давление в пазухах, благодаря естественному механизму осмоса. Кроме того, он промывает и очищает носовую полость, разжижает и удаляет избыточное количество слизи вместе с вирусами, бактериями, пыльцой растений и другими загрязнениями, блокирующей носовые ходы, облегчает носовое дыхание.

Оказывает благоприятное воздействие на слизистую носоглотки благодаря содержанию всего спектра микроЭлементов, имеющихся в морской воде.

Синомарин® Нео может использоваться с помощью небулайзера, для облегчения дыхания при воспалительных заболеваниях легких. У грудных детей с острым бронхиолитом ингаляции с **Синомарин® Нео** помогают уменьшить отечность и разжижают слизь в бронхах, таким образом снимаю заложенность дыхательных путей.

Действие гипертонического раствора морской воды:

- ▶ являясь натуральным деконгестантом, уменьшает отечность и заложенность носа.
- ▶ снимает воспаление слизистой оболочки полости носа, разжижает и выводит слизь
- ▶ удаляет вирусы, бактерии и пыльцевые аллергены из носовой полости
- ▶ помогает восстановить естественную функцию слизистой оболочки носа
- ▶ помогает устранить симптоматику, связанную с заложенностью носа (зуд, чихание, кашель, чувство давления в ушах, нарушение сна)
- ▶ при распылении с помощью небулайзера уменьшает отек слизистых оболочек дыхательных путей и разжижает слизь в бронхах, таким образом уменьшая обструкцию дыхательных путей. Это помогает увеличить дыхательную функцию и предотвращает развитие инфекций нижних дыхательных путей.

Синомарин® Нео

Капли назальные, применяются у детей с первых дней жизни и старше.

Форма выпуска

Одноразовые стерильные флаконы-капельницы по 5 мл с каплями назальными, 6 или 18 флаконов вместе с инструкцией на казахском и русском языках помещают в коробку из картона.

Производится в соответствии с Технической спецификацией производителя.

Область применения и назначения медицинского изделия

Синомарин® Нео применяется для профилактики и комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, огилоносовых пазух и носоглотки у детей.

Показания к применению:

- В составе комплексного лечения острых и хронических заболеваний полости носа и придаточных пазух, сопровождающихся заложенностью носа у детей с первых дней жизни и старше:
риниты (инфекционные или аллергический);
ОРВИ и грипп;
синуситы.
- Для профилактики вторичных ЛОР-инфекций и осложнений, например отит.
- После эндо鼻腔альных операций, для ускорения выздоровления.
- При нарушении дыхательной функции или при остром бронхиолите (ингаляции с помощью небулайзера).

Способ применения и дозы:

По несколько капель в каждый носовой ход, 2-3 раза в день (или согласно врачебным рекомендациям). При необходимости возможно увеличение кратности промывания. Длительность применения не ограничена. При распылении с помощью небулайзера, в емкость для лекарства добавляется до 5 мл **Синомарин® Нео**. Ингаляции делаются 3 раза в день или в соответствии с рекомендациями врача.

Синомарин® Нео можно использовать с любым типом небулайзера, который доступен на рынке.

Инструкция по применению:

1. Возьмите один флакон.
2. Откройте крышечку-наконечник, чтобы открыть флакон.
3. Положите ребенка на спину и поверните голову направо.
4. Осторожно вставьте наконечник в левую ноздрю и введите необходимое количество препарата, мягко нажимая на стенки флакона.
5. Поверните голову ребенка на другую сторону и повторите действия.
6. При необходимости повторите процедуру.
7. Удалите носовой аппликатор из ноздри, посадите ребенка и, удерживая его затылок, подождите несколько секунд, чтобы препарат начал действовать, затем очистите нос или используйте специальный отсос для удаления слизи.

При использовании **Синомарин® Нео** с помощью небулайзера, выполните рекомендации, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению производителя для данного типа небулайзера.

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия

Только для интраназального применения и для дыхательных ингаляций (с помощью небулайзера). Каждый флакон должен использоваться только один раз. Нет информации о нежелательных эффектах.

Противопоказания для применения

Нет

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °C, в защищенном от солнечного света месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Производитель:

Gerolymatos International®

Gerolymatos International S.A., Греция
13, Asklepiou str., 145 68 Kryoneri, Attiki, Greece.
Тел.: +30 2103500800
www.sinomarin.com

Изготовлено на заказ для компании **Seltfar LTD.**,
Великобритания,
(Berkeley Square house office 132, London, England, W1J 6BD).
Тел./факс +44 (0)207 969 1421/1424, info@seltfar.co.uk

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан и организация, принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

Представительство «Сэлтфар LTD», г. Алматы, пр.
Аль-Фараби 5, Нұрлы Тау 1А, офис 301. Тел/факс +7 (727)
311 16 28, info@seltfarrep.kz

Выпуск инструкции по медицинскому применению:

29.10.2015

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке

Производитель

Максимальная температура хранения

Изучите инструкцию по медицинскому применению

LOT

Номер серии

Годен до

Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского Союза, цифры обозначают идентификационный номер уполномоченного органа, выдавшего знак

Синомарин® Нео:

